

	Marque :	
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	5 ans
	Année de mise sur le marché :	2008 en France
	Code CLADIMED :	M50CD01
	Code CND :	/
	Code GMDN :	33031
	Version :	E
	Date :	25/05/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Ceinture lombaire apportant un soutien renforcé, grâce aux sangles additionnelles réglables.

Caractéristiques

- 4 baleines dorsales et 2 baleines abdominales aident le patient à adopter une posture correcte en limitant les mouvements latéraux et la rotation du tronc,
- Rembourrage supplémentaire sur les 2 baleines dorsales externes, confort accru,
- Fermeture avec passe-main, facilitant la mise en place de la ceinture et permettant de l'ajuster,
- 2 sangles supplémentaires réglables permettent une meilleure mise en place et le contrôle du niveau de pression,
- Tissu aéré, élastique,
- Découpe anatomique, permettant d'épouser précisément les contours morphologiques,
- Idéale pour les patients actifs, la ceinture reste en place lors des mouvements,
- Disponible en 6 tailles avec une hauteur de dos de 26 cm,
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

74% polyamide, 18% élasthanne, 5% polyester, 3% autres composants.

Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

Conditionnement / Stérilisation

Présentation en boîte unitaire avec notice d'utilisation. Les mesures correspondent au tour de taille. Produit livré non stérile.

Références

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Tour de taille	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809265835	73452-16	73452-00	XS	52-62 cm	1	12	201E00.022
4042809265859	73452-17	73452-01	S	63-74 cm	1	12	201E00.022
4042809265873	73452-18	73452-02	M	75-89 cm	1	12	201E00.022
4042809265897	73452-19	73452-03	L	90-105 cm	1	12	201E00.022
4042809265910	73452-20	73452-04	XL	106-120 cm	1	12	201E00.022
4042809265934	73452-21	73452-05	XXL	121-140 cm	1	12	201E00.022



CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Lombalgies aiguës et chroniques, douleurs dorsales liées à des problèmes dégénératifs (ostéoporose, ostéochondrose, spondylose, spondylarthrose, syndrome facettaire...), instabilités lombaires (insuffisance musculaire et ligamentaire),
Rééducation post traumatique, après une opération des disques intervertébraux ou en prévention lors de microtraumatismes répétés.

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

1. Veiller à positionner correctement la ceinture. L'étiquette portant l'indication « Top » ainsi que l'ouverture de la poche intérieure à l'arrière doivent être dirigées vers le haut.
2. À l'aide du passe-main ventral, ajuster la ceinture autour du corps, en appliquant la tension désirée.
3. Éviter la formation de plis.
4. Positionner les deux sangles additionnelles, à l'aide des passe-mains afin d'ajuster le maintien. Ajuster si nécessaire à un maintien confortable.

Précautions d'emploi

- Il est conseillé de porter la ceinture par-dessus un vêtement léger.
- En cas de gonflement anormal ou d'inconfort durant le port de la ceinture, interrompre l'utilisation de la ceinture et consulter un médecin.
- En cas de sudation excessive, prendre contact avec le médecin.

Particularités d'utilisation

- Veiller à respecter scrupuleusement les recommandations du professionnel de santé.
- Veiller à ce que les plaies recouvertes par la ceinture soient protégées par un pansement approprié.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Fermer les attaches. Lavage en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main, à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux. Rincer abondamment. Ne pas essorer. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec. Laisser sécher à température ambiante. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de sèche-linge. S'assurer que la ceinture est complètement sèche avant de l'utiliser de nouveau.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485