

F	A LIRE ATTENTIVEMENT	021 / 04
----------	-----------------------------	-----------------



PRODUIT EN ALUMINIUM

- **NE PAS PASSER EN MACHINE A LAVER**
- **NE PAS METTRE AUX ULTRASONS**
- **ATTENTION : certains produits de décontamination sont incompatibles avec l'aluminium : se référer aux notices d'utilisation**

Cet article en aluminium est coloré par un procédé d'anodisation. Cette anodisation et l'aluminium peuvent être détériorés par certains agents.

Ne pas utiliser de produits alcalins, trop acides, ni de produits incluant Soude ou Potasse.

Un PH de 4 à 8 ne présente aucun risque particulier.

Lire attentivement les notices des produits que vous utilisez pour le nettoyage et tenir compte des incompatibilités avec l'aluminium. L'utilisation de cuves ultra-son pour le nettoyage risque de détériorer l'anodisation et la couleur.

Les détériorations liées à une mauvaise manipulation ne pourront donner lieu à un échange.

Pour la stérilisation les modes suivants peuvent être utilisés en toute sécurité : autoclave (134°), chemiclave (132°) ou chaleur sèche (180°) en se référant pour le cycle et la durée aux instructions du fabricant.