


MANUEL D'UTILISATION – INSTRUCTION MANUAL
MULTI MASSAGER

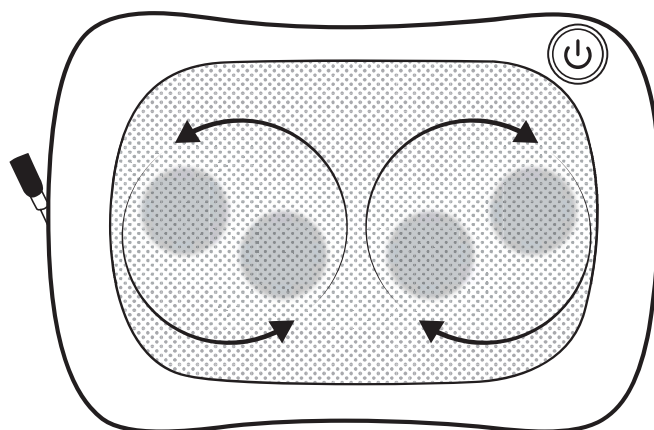

Terraillon. c€

www.terraillon.com

MULTI MASSAGER

FR	Coussin massant Shiatsu multi-zones NOTICE D'UTILISATION	3
EN	Shiatsu Multi functional massage pillow INSTRUCTIONS MANUAL	10
DE	Shiatsu-Massagekissen mit mehreren Zonen BEDIENUNGSANLEITUNG	17
NL	Shiatsu-massagekussen met meerdere zones GEBRUIKSAANWIJZING	24
IT	Cuscino massaggiante Shiatsu multizona LIBRETTO DI ISTRUZIONI	31
ES	Cojín de masaje Shiatsu multizona INSTRUCCIONES DE USO	38
SV	Shiatsu-massagekudde med flera zoner som BRUKSANVISNING	45



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Terraillon®

FR

Cher(e) client(e),

Merci d'avoir acheté le Multi Massager. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil de massage, car ce manuel contient des informations supplémentaires, notamment des consignes de sécurité et des avertissements.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous trouverez notre centre d'aide en scannant le code QR situé sur la partie opposée avec votre smartphone. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez également contacter notre Service Après-Vente : serviceconsommateurs@terraillon.fr



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

ATTENTION

Si vous présentez les affections ou problèmes de santé suivants, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.

1. Grossesse, diabète, ostéoporose.
2. Utilisation d'un stimulateur cardiaque (pacemaker), chirurgie récente, épilepsie ou migraines, protrusion des disques intervertébraux lombaires et déplacement antérieur des vertèbres osseuses.
3. Implants métalliques et autres dispositifs.
4. Dispositifs électroniques médicaux transplantés in vivo, tels que les régulateurs d'impulsions.
5. Cœurs et poumons artificiels et autres dispositifs électroniques médicaux de maintien en vie.
6. Dispositifs électroniques médicaux portables tels que les électrocardiographes.
7. Patients souffrant d'une maladie aiguë.
8. Patients qui ressentent des anomalies dans le corps.

FR

PRÉCAUTIONS

1. Les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser ce produit. Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le ranger hors de portée des enfants.
2. L'appareil a une fonction chauffante, et les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent y prêter attention. Les patients souffrant de maladies infectieuses doivent utiliser ce produit seul. En cas d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
3. Ce produit est un appareil de soins personnels et ne peut remplacer un dispositif médical.
4. N'immergez pas ce produit dans l'eau. Si le produit tombe dans l'eau, faites-le inspecter rapidement.
5. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou dans le feu.
6. Ne laissez pas tomber le produit intentionnellement.
7. N'essayez pas de démonter le produit.
8. Il est interdit de remplacer ou de compléter un traitement médical par l'appareil. Si vous ressentez une douleur ou si vous recevez un traitement, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
9. Si l'équipement est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.
10. Ne pas utiliser dans des endroits tels que les salles de bains.
11. Ne pas utiliser ce produit en cas d'intoxication ou de malaise.
12. Ne pas s'endormir pendant l'utilisation du produit.
13. Il est interdit d'utiliser des accessoires de produits d'autres fournisseurs.

CONTENU DU CARTON

Multi Massager x 1
Notice d'utilisation x 1
Câble de recharge x 1


4

Terraillon®

FR

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Coussin massant Shiatsu multi-zones

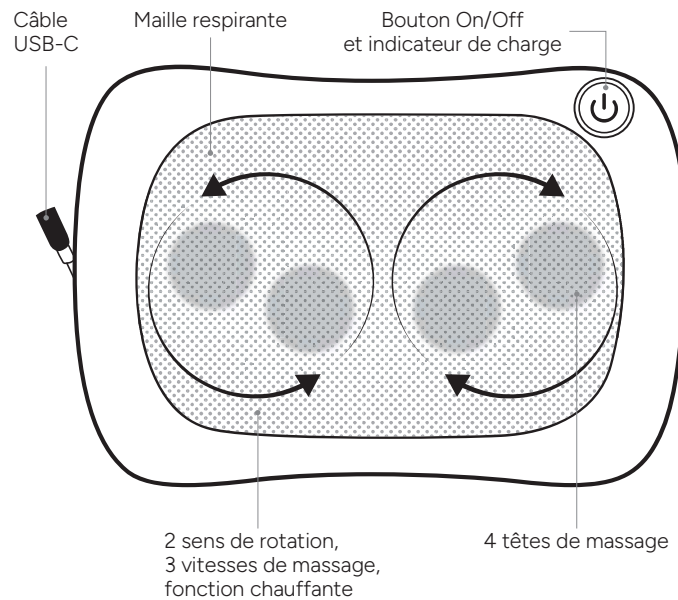

CHARGEMENT DU PRODUIT

⚠ Pour votre sécurité, utilisez toujours un chargeur/adaptateur d'entrée 7V approprié pour charger l'appareil de massage. N'UTILISEZ PAS d'adaptateur USB à chargement rapide, car cela pourrait endommager le produit.

Terraillon.


FR

Important : le Multi Massager ne doit pas être allumé pendant la recharge.

1. Utilisez le câble USB-C fourni avec cet appareil de massage.
2. Branchez la fiche USB-C sur le port de charge USB-C.
3. Connectez la prise USB à un port USB d'un adaptateur mural standard pour commencer le chargement.
4. Lorsque le Multi Massager est en charge, le voyant lumineux est rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux devient vert.

ATTENTION :

- Vous devez sélectionner un chargeur adapté au produit auprès d'un fabricant qualifié.

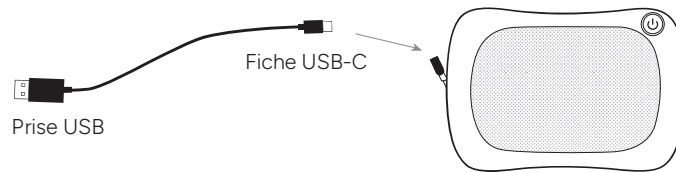

⚠ Consignes de sécurité pour le chargement de la batterie lithium du produit :

- La tension d'entrée est de 7 V CC 1 A.
- Afin de charger le produit de manière sûre et fiable, veuillez utiliser un adaptateur mural certifié et en bon état.
- Chargez le produit uniquement à des températures ambiantes comprises entre 10 °C/40 °F et 40 °C/104 °F.
- Ne chauffez pas l'appareil au-delà de 70 °C/158 °F. Ne pas jeter au feu.
- Tenez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Éteignez le produit après utilisation.

FR

- Remarque : nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit, par exemple en cas d'utilisation d'une tension supérieure à celle indiquée. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou des pertes matérielles.
- Dans des cas extrêmes, l'utilisation incorrecte d'une batterie au lithium peut entraîner une explosion, générer de la chaleur, un incendie ou un dégagement de fumée.

UTILISATION DU PRODUIT

1. Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt (⏻) du Multi Massager pour l'allumer et enclencher la vitesse la plus lente. La fonction chauffante est activée par un éclairage rouge et les têtes de massage commencent à tourner.
2. Appuyez une deuxième fois sur le bouton (⏻) pour activer la vitesse moyenne de massage.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton (⏻) pour activer la vitesse élevée.
4. Appuyez longuement sur la touche (⏻) pour éteindre l'appareil.

Pendant le cycle de massage, le sens de rotation des têtes change toutes les minutes. La durée d'un cycle est d'environ 15 minutes. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme.

FAQ

• Pourquoi mon Multi Massager ne s'allume-t-il pas ?

Si votre Multi Massager ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

• Pourquoi mon Multi Massager ne charge-t-il pas ?

Si votre Multi Massager ne se charge pas, assurez-vous que chaque extrémité du câble de chargement est bien fixée à l'appareil de massage et à la source d'alimentation. Vérifiez que la prise murale fonctionne correctement. Si vous utilisez un port USB d'ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.

Terraillon.

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit	Multi Massager
Capacité de la batterie	2 000 mAh
Mode massage	3 vitesses de massage , 2 sens de rotation - rotation automatique
Fonction chauffante	Massage à chaleur douce
Temps de charge	4h30
Utilisation d'une batterie entièrement chargée	Environ 1h30
Interface de chargement	USB-C
Puissance nominale	18 W
Longueur du produit	33 cm
Longueur du câble	120 cm
Poids	1,6 kg

UTILISATION ET ENTRETIEN

Pour réduire le risque de panne, de choc électrique, de blessure, d'incendie et de dommage à l'équipement, veuillez lire toutes les instructions et avertissements de ce manuel.

1. Ne jetez pas, ne rangez pas et n'utilisez pas l'appareil de massage à proximité ou dans un feu ou une flamme nue.
2. N'essayez pas de démonter l'appareil de massage.
3. Veuillez consulter votre médecin avant utilisation. Cet appareil de massage n'est pas destiné à remplacer ou à compléter les traitements médicaux prescrits.
4. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide, n'utilisez pas de détergents corrosifs.

FR

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Si vous avez une réclamation, contactez d'abord le magasin où vous avez effectué votre achat.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Lorsque le produit n'est plus utilisable, veuillez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Terraillon.